



Instructivo para la prueba de Células Lupus Eritematoso CLE

Código: I-FMED-LAC-11

Revisión: 02

Página: 1 de 4

Fecha de emisión: 24 de Octubre 2008

Fecha de modificación: 11 de enero de 2016

1.- OBJETIVO

Proporcionar información para realizar la prueba de células de lupus eritematoso (C.L.E)

2.- ALCANCE

Aplica para todas las muestras referenciadas al laboratorio y a QFB que laboran dentro del Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina UADY.

3.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

| Tarea/ Decisión | Descripción (nombre) | Responsable | Descripción de la operación detallada | Registro de Calidad (código) |
|-----------------|----------------------|-------------|---|------------------------------|
| N/A | N/A | Químico | 3.1 Verifica que la muestra este en el vial adecuado, con el volumen requerido, y que este rotulada con nombre o número interno. 3.2 Notifica al responsable del laboratorio en caso de que la muestra no cumpla con los requisitos. | N/A |
| N/A | N/A | Químico | 3.3 Registra a los pacientes en la Bitácora de Hematología y Hemostasia | F-FMED-LAC-06 |
| N/A | N/A | Químico | 3.4 Procesa la muestra según la técnica de la prueba. Carpeta de Inserto de reactivos y técnicas de laboratorio de análisis clínicos. | N/A |
| N/A | N/A | Químico | 3.5 Reporta los resultados obtenidos en la Bitácora de Hematología y Hemostasia , misma que firma. | F-FMED-LAC-06 |
| N/A | N/A | Químico | 3.6 Entrega al personal de recepción la Bitácora de Hematología y Hemostasia para su reporte, revisión y firma final. | F-FMED-LAC-06 |
| N/A | N/A | Químico | 3.7 Coloca el material utilizado para la prueba en el área de lavado | N/A |



Instructivo para la prueba de Células Lupus Eritematoso CLE

Código: I-FMED-LAC-11

Revisión: 02

Página: 2 de 4

Fecha de emisión: 24 de Octubre 2008

Fecha de modificación: 11 de enero de 2016

4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

| Código | Nombre del documento | Lugar de almacenamiento |
|----------------|--|-------------------------|
| N/A | Técnica de Células Lupus Eritematoso (C.L.E) | Área de Procesamientos |
| I-FMED-RPBI-01 | Instructivo para el manejo de RPBI | Área de Jefatura |

5.- CONTROL DE REGISTROS

| Identificación | Nombre del registro | Lugar de almacenamiento | Responsable de su protección | Tiempo de retención | Disposición de los registros |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| F-FMED-LAC-06 | Bitácora de Hematología y Hemostasia | Área de Procesamientos | Químico Analista | 3 años | Eliminación del archivo |



Instructivo para la prueba de Células Lupus Eritematoso CLE

Código: I-FMED-LAC-11

Revisión: 02

Página: 3 de 4

Fecha de emisión: 24 de Octubre 2008

Fecha de modificación: 11 de enero de 2016

6.- GLOSARIO

6.1 .- SIGLAS

QFB.- Químico Farmacéutico Biólogo

UADY.- Universidad Autónoma De Yucatán

RPM.- Revoluciones Por Minuto

RPBI.- Residuos Peligrosos Biológico-Infeciosos

N/A.- No Aplica

CLE.- Células de Lupus Eritematoso

6.2 .- DEFINICIONES

CELULAS LE.- Célula sanguínea característica por presentar inclusiones definidas y constantes considerandolas como un cuerpo de inclusión pálido y homogéneas localizadas a un lado del núcleo del neutrófilo que lo fagocita.

LUPUS ERITEMATOSO.- Trastorno autoinmune inflamatorio crónico que puede afectar muchos sistemas de órganos, incluyendo piel, articulaciones y órganos internos.

PORTAOBJETOS.- Es una delgada placa de cristal sobre el cual se disponen objetos para su examen microscópico. El objeto a observar suele disponerse sobre este artefacto para después situarse en el microscopio y ser observado.



Instructivo para la prueba de Células Lupus Eritematoso CLE

Código: I-FMED-LAC-11

Revisión: 02

Página: 4 de 4

Fecha de emisión: 24 de Octubre 2008

Fecha de modificación: 11 de enero de 2016

7.- CONTROL DE REVISIONES

| Nivel de revisión | Sección y/o página | Descripción de la modificación y mejora | Fecha de modificación |
|-------------------|--|--|-----------------------|
| 01 | Políticas Descripción de las actividades | Se cambió el horario de recepción de muestras, se aumentaron políticas en la fase pre-analítica, analítica y se enumeraron. Se describió la actividad de manera más detallada. | 26 Marzo 2010 |
| 02 | Todo el documento. Descripción de la Operación Control de Registros. | Se adecuo al nuevo formato F-DGPLANEI-CC/GA-39/REV:01 Se modificó la redacción de acuerdo a los lineamientos para elaborar y modificar documentos del SGC. Se modificó el contenido y se redactó de manera detallada las actividades a realizar. Se actualizo la Bitácora F-FMED-LAC-06 | 11 de enero de 2016 |

Nota: Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco.

Elaboró

Q.F.B. María Angélica González
Góngora
Químico Analista

Revisó

MC. William Vargas Cano
Secretario Administrativo

Aprobó

M.C. Guillermo Storey Montalvo
Director de la Facultad de Medicina

Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.