



### Instructivo para la prueba de Factor Reumatoide

Código: : I-FMED-LAC-32

Revisión: 02

Página: 1 de 3

Fecha de emisión: 24 Octubre 2008

Fecha de modificación: 17 de  
diciembre de 2015

## 1.- OBJETIVO

Proporcionar información necesaria para la realización de la prueba de Factor Reumatoide (Látex).

## 2.- ALCANCE

Aplica para todas las muestras referenciadas al laboratorio y a Q.F.B. que laboren en el Laboratorio de Análisis Clínicos de la Facultad de Medicina UADY.

## 3.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN

Tarea/ Decisión	Descripción (nombre)	Responsable	Descripción de la operación detallada	Registro de Calidad (código)
N/A	N/A	QUÍMICO	3.1 Identifica la muestra por medio del nombre completo o numero interno.  3.2 Posteriormente centrifuga la muestra por 10 min a 4000 RPM	N/A
N/A	N/A	QUÍMICO	3.3 Realiza la prueba usando el suero obtenido del centrifugado y también los controles de calidad de factor reumatoide de acuerdo al inserto del reactivo en uso para corroborar la estabilidad del reactivo, (ver Carpeta de Insertos de Reactivos y Técnicas de Laboratorio)  3.4 Registra los resultados obtenidos de los pacientes en la bitácora de Serología.	F-FMED-LAC-08
N/A	N/A	QUÍMICO	3.5 Verifica los datos del paciente y su respectivo resultado, posteriormente entrega la bitácora de Serología al personal de recepción para su transcripción.	F-FMED-LAC-08



## Instructivo para la prueba de Factor Reumatoide

Código: : I-FMED-LAC-32

Revisión: 02

Página: 2 de 3

Fecha de emisión: 24 Octubre 2008

Fecha de modificación: 17 de  
diciembre de 2015

### 4.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código	Nombre del documento	Lugar de almacenamiento
N/A	Inserto de la prueba para Factor Reumatoide	Carpeta de Insertos de Reactivos y Técnicas de Laboratorio
I-FMED-RPBI-01	Instructivo para el manejo de RPBI	Laboratorio de Análisis Clínicos.

### 5.- CONTROL DE REGISTROS

Identificación	Nombre del registro	Lugar de almacenamiento	Responsable de su protección	Tiempo de retención	Disposición de los registros
F-FMED-LAC-08	Bitácora de Serología	Área de Procesamiento	Químico Analista	3 años	Eliminación del Archivo

### 6.- GLOSARIO

#### 6.1 .- SIGLAS

UADY.- Universidad Autónoma de Yucatán  
FR.- Factor Reumatoide (Latex)  
RPM.- Revoluciones Por Minuto  
QFB. Químico Farmaceutico Biologo

#### 6.2 .- DEFINICIONES

**Factor Reumatoide.-** autoanticuerpos dirigidos contra un fragmento de una clase de inmunoglobulinas (Ig), conocida como IgG y pertenecen a una clase de proteínas que se eleva en estados de inflamación. El Factor Reumatoide está elevado en la mayoría de pacientes con inflamación, y por ello es una prueba sensible para monitorizar el nivel de inflamación asociado a artritis reumatoide.



**Instructivo para la prueba de Factor Reumatoide**

Código: : I-FMED-LAC-32

Revisión: **02**

Página: **3 de 3**

Fecha de emisión: **24 Octubre 2008**

Fecha de modificación: **17 de diciembre de 2015**

**Artritis reumatoide.**- Es una enfermedad crónica que generalmente afecta a las articulaciones: con más frecuencia manos y muñecas.

**7.- CONTROL DE REVISIONES**

Nivel de revisión	Sección y/o página	Descripción de la modificación y mejora	Fecha de modificación
01	Políticas Descripción de las actividades	Se cambió el horario de recepción de muestra, se le aumento la preparación del diluyente y se enumeraron. Se modificó la técnica.	26 de Marzo 2010
02	Todo el documento Objetivo y alcance. Descripción de actividades y control de registros	Se adecuo de acuerdo al formato F-CIPLADE-CC-39 Se adecuaron de acuerdo al título del instructivo. Se modificaran las actividades y actualizaron los códigos y nombre de las bitácoras de registro.	17 de diciembre 2015

**Nota:** Ésta sección será utilizada a partir de la primera modificación a este documento. La revisión 00, se mantendrá en blanco.

**Elaboró**

Q.F.B. José Francisco Sulú Chí  
Químico analista

**Revisó**

MC. William Vargas Cano  
Secretario Administrativo

**Aprobó**

MC. Guillermo Storey Montalvo.  
Director

**Las firmas avalan la responsabilidad de las personas que: elaboran el documento, revisan su adecuación y aprueban para su implementación dentro del Sistema de Gestión de la Universidad Autónoma de Yucatán.**